

M/L-10

LAPAROSKOPISCHER MULTIFIRE-CLIPAPPLIKATOR

Anleitung


Laden und Entladen:

1. Die rote Lasche des Einmal-Clipmagazins festhalten, um eine Verschiebung des Clip-Mechanismus zu vermeiden.
2. Das Magazin bei vollständig durchgedrücktem Handgriff von hinten in den Applikator einführen.
3. Beim Laden sicherstellen, dass der Pfeil auf dem Magazin, der sich auf der den Clips gegenüber liegenden Seite befindet, am Pfeil an der Rückseite des Applikators ausgerichtet ist.
4. Ist das Magazin vollständig eingeführt, den Handgriff freigeben. Jetzt ist ein Clip in den Branchen des Applikators geladen.
5. Den M/L-10 vor Gebrauch inspizieren. Sicherstellen, dass der Handgriffmechanismus ordnungsgemäß funktioniert und die Branchen vor Gebrauch korrekt aneinander ausgerichtet sind. Einzelheiten zur Inspektion sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.
6. Zum Setzen von Clips den Handgriff vollständig durchdrücken, um den Clip vollständig zu schließen. Nach Schließen des Clips den Handgriff freigeben. Bei Durchführung einer Cholangiographie den Handgriff bis zum siebten Klick durchdrücken, um den Clip nur teilweise zu schließen.
7. Den Handgriff vollständig durchdrücken und das Magazin nach dem Gebrauch bzw. vor der Sterilisation entfernen.



Zerlegen:

1. Vor der Reinigung zum Entfernen und Entsorgen des Einmal-Magazins den Handgriff vollständig durchdrücken.
2. Wurden nicht alle der 10 (bzw. 19) Clips gesetzt, den noch in den Branchen des Applikators befindlichen Clip auf ein Abdecktuch o. Ä. auslösen, damit er nicht auf den Boden fällt, an den Branchen hängen bleibt oder in den Schaft des Instruments rutscht und möglicherweise eine Blockade verursacht.
3. Zum Entfernen des Außenrohrs den Handgriff vollständig durchdrücken und das Außenrohr im Uhrzeigersinn abschrauben.

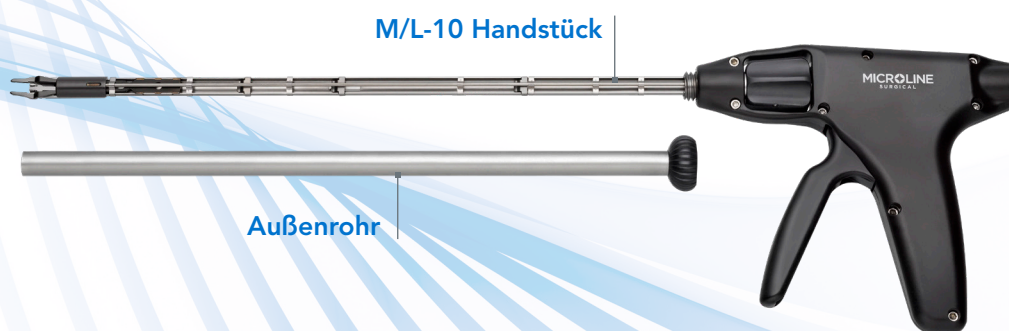

Wichtig:

- Hinweis: Vor jeder Sterilisation ein wasserlösliches Schmiermittel verwenden.
- Das Clipmagazin beim Laden nicht mit Gewalt in den M/L-10 Applikator einführen.
- Den M/L-10 nicht nach oben gerichtet auslösen. Ein auf diese Weise ausgelöster Clip kann in das Instrument zurück rutschen und eine Blockade verursachen. Stets darauf achten, dass das Instrument beim Auslösen nach unten zeigt.

Inspektionen:

- Die Branchen des Applikators auf inkorrekte Ausrichtung und Beschädigungen untersuchen. Den Clipapplikator nicht verwenden, wenn die Branchen beschädigt sind.
- Den Schaft mithilfe des Drehknopfes drehen, um auf Mahlgeräusche zu prüfen. Werden derartige Geräusche vernommen, den Clipapplikator nicht verwenden.
- Den Handgriff 20-mal durchdrücken und freigeben, um auf ein Haken oder andere Anzeichen von Beschädigungen zu prüfen. Werden ein Haken oder andere Beschädigungen festgestellt, den Clipapplikator nicht verwenden.
- Den Innen- und Außenschaft auf Geradheit untersuchen. Das Außenrohr entfernen, um den Innenschaft auf beschadigungsbedingte Verbiegungen zu überprüfen. Sieht der Innenschaft verbogen aus, den Clipapplikator nicht verwenden.
- Zwei Clips auf ein Abdecktuch oder eine ähnliche Oberfläche auslösen, um das ordnungsgemäße Funktionieren des Clipapplikators sicherzustellen. Dabei im Einzelnen überprüfen, ob die Clips vorschriftsmäßig in den Branchen des Applikators sitzen, die Clips richtig geschlossen werden und die Branchen korrekt aneinander ausgerichtet sind.
- Das Instrument auf biologische Verunreinigungen an den Branchen sowie am Innen- und Außenschaft untersuchen. Werden biologische Verunreinigungen festgestellt, das Instrument nicht verwenden und vor dem Patienteneinsatz erneut reinigen und sterilisieren.

MICROLINE
SURGICAL

50 Dunham Road | Beverly, MA 01915 USA
Tel.: +1 978-922-9810 | Fax: +1 978-922-9209 | www.microlinesurgical.com

Microline B.V. | Fortranweg 5 | 3821BK | Amersfoort, Niederlande
Tel.: +31 (0) 33 76 000 11 | Fax: +31 (0) 33 76 000 14 | www.microlinesurgical.com

© 2018 Microline Surgical. Microline ist eine Marke und/oder eine eingetragene Marke von Microline Surgical.
M/L-10 ist eine Marke und/oder eine eingetragene Marke von Microline Surgical.
Artikelnr.: 09-39-00468-00 REV A, 06/20

Wichtig: Vor dem Gebrauch die im Lieferumfang dieses Produkts enthaltene Gebrauchsanweisung durchlesen, um ausführliche Informationen über Indikationen, Kontraindikationen, unerwünschte Ereignisse, empfohlene Vorgehensweisen sowie Warn- und Vorsichtshinweise zu erhalten.